

*Intelligente, interactieve therapie voor
positioneel obstructieve slaapapneu & snurken*

Night Shift
Gebruikersinstructies

Terugsturen na de proefperiode

U krijgt per sms en e-mail een uitnodiging om uw Night Shift terug te sturen.
De verzending is kosteloos indien de bijgeleverde verpakking gebruikt wordt.

Iets niet duidelijk?

Bel onze klantendienst op 0800/145.47, stuur een e-mail naar cs@vivisol.be of surf naar www.nightshift.vivisol.be.

Volledige handleiding wordt bij aankoop geleverd.



Verdeeld door:



Zoning Ouest 14 - 7860 Lessines

t 0800/145.47

e cs@vivisol.be

www.vivisol.be



*Intelligente, interactieve therapie voor
positioneel obstructieve slaapapneu & snurken*

Bevestig de Night Shift rond de hals zoals op onderstaande foto's:



Regel de halsband en span niet te strak aan zodat er aan weerszijden twee vingers tussen kunnen:



U kunt nu uw Night Shift uittesten, de interne batterij is volledig opgeladen voor 3 nachten. Opladen van de Night shift kunt u doen via de meegeleverde USB-kabel. Die kunt u verbinden met uw computer of via een USB-stekker (niet bijgeleverd).

Start : druk op de witte toets gedurende 1 seconde voor het slapengaan.

Stop : druk na het ontwaken kort op de witte toets

Merk op : na **start** trilt het toestel 3x kort na elkaar. Dit betekent dat de batterij opgeladen is voor 3 nachten.

2x kort na elkaar trillen = batterij goed voor 2 nachten

1x trillen = batterij goed voor 1 nacht

